

再使用禁止

ムーシールド

【禁忌・禁止】

・再使用禁止

【使用目的、効能又は効果】

歯牙の誘導に用いる。

【操作方法又は使用方法等】


- (1) 試適
適合チェック(上顎歯列、舌小帯)
不適合部の調整
- (2) 光重合レジン^①の築成 →※必要ない場合は(5)へ
・オクルーザルフロア(ボディー部)に光重合レジン^①を圧接
・試適した位置に装着
・光重合レジン^①の重合
- (3) 余剰分レジン^①のトリミング
・はみ出した光重合レジン^①を取り除く
- (4) 微調整
・もう一度試適
・「上顎前歯の歯面がムーシールド上側部分の前面に接触しないように仕上げる
・仕上げ研磨
- (5) 完成
※装着時間は日中の2時間以上、および就寝中である。
これを数か月継続して使用させる。

【形状・構造及び原理等】


本品は、次の原材料で構成する。
・ポリメタクリル酸メチル(PMMA)

種類(幅×奥行) : S(62×39)、 M(65×42)
※単位:mm


(構造等)

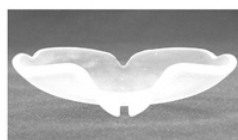

後方から見たところ

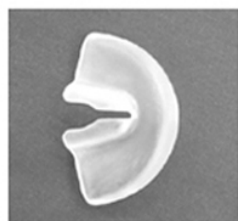

上から見たところ

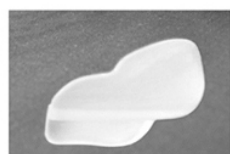

横から見たところ

【使用上の注意】**(*)

- ①本品は耐熱性ではないため熱を加えないこと。
- ②アルコール等の消毒薬は本品を変質・変色させるため用いないこと。洗浄する際はリテーナー専用の薬剤を使用すること。
- ③歯ざり等の強い力が加わる場合は破損が考えられるため使用しないこと。
- ④本品に、ヒビ・深い咬みあと・キズ・変形・変色等の異状があるときは、強度が低下する。これらが見られるときは、ただちに使用を中止し、新しいムーシールドを処方すること。
- ⑤廃棄する場合は「廃棄物処理に関する法律」に従い適切に処理すること。
- ⑥本品は、ムーシールドセミナーを受講する等により製品を熟知した歯科医師が処方すること。
- ⑦本品は、日中2時間以上及び睡眠中に装着させること。また週末は、できるだけ長く装着するよう指導すること。
- ⑧本品添付の患者説明書を用いて、患者に十分指導を行うこと。
- ⑨「毎回使用前に製品の状態を確認すること」及び「異状が見られるときは使用しないこと」を、患者に十分伝えておくこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

【貯蔵・保管方法】

- 1) 開封前には特に指定しないが、外圧がかからないように保管すること。
- 2) 歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

2個入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売 : 株式会社バイオデント
住所 : 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-33-19
電話番号 : 03-5604-0980
FAX番号 : 03-3801-7560
輸入先国名 : アメリカ合衆国
製造業者 : American Orthodontics
アメリカンオーソドンティックス