

再使用禁止

ムーシールド

【禁忌・禁止】
・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、次の原材料で構成する。
・ポリメタクリル酸メチル(PMMA)

種類(幅×奥行) : S(62×39)、 M(65×42)
※単位:mm

(構造等)



【使用目的又は効果】

歯の誘導に用いる。

【使用方法等】

- (1) 試適
 - 適合チェック(上顎歯列、舌小帯)
 - ・不適合部がないとき→調整せずに使用させる。
 - ・不適合部があるとき→(2)へ進む。
- (2) 光重合レジン の 築 成
 - ・オクルーザルフロア(ボディー部)に光重合レジン を 圧 接
 - ・試適した位置に装着
 - ・光重合レジン の 重 合
- (3) 余剰分レジン の トリミング
 - ・はみ出した光重合レジン の 除 去。
- (4) 微調整
 - ・再試適
 - ・上顎前歯の歯面がムーシールド上側部分の前面に接触しないように仕上げる。
 - ・仕上げ研磨
- (5) 完成
 - ※日中2時間以上及び就寝中の装着を、数か月継続させる。

【使用上の注意】*

- 1) 使用注意
 - ①患者に歯ぎしりがあるとき、何らかの理由で本品を咬んでしまうと、本品が所定の位置からずれてしまうとき、またこれらが考えられるときは、破損の危険性があるため本品を使用しないこと。
 - ②本品を患者に処方したら、定期的に来院させ、本品に異状がないことを確認すること。本品に、ヒビ・咬みあと・キズ・変形・変色等の異状があるときは、強度が低下するため、ただちに使用を中止し新しいムーシールドを処方すること。
 - ③本品は、耐熱性ではないため、熱を加えないこと。
 - ④アルコール、その他多くの消毒薬は、本品を変質・変色させるため、用いないこと。洗浄する際はリテーナー専用の薬剤を使用すること。
 - ⑤毎回使用前に製品の状態を確認し、異状が見られるときは使用せず、処方した医院にかかること。
 - ⑥①から⑤の事項を患者の保護者に伝えておくこと。
 - ⑦本品を削るなどの加工を施すと強度が低下するため、行わないこと。*
 - ⑧本品添付の患者説明書を用いて、患者の保護者に指導を行うこと。
 - ⑨本品は、ムーシールドセミナーを受講する等により、製品を熟知した歯科医師が処方すること。

2) 重要な基本的注意

- ①本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。*
- ②破折は誤飲・誤嚥につながる可能性がある。誤飲・誤嚥が起きたとき、又はそれが疑われるときは、ただちに適切な病院にかかるよう患者の保護者に伝えておくこと。その際本品に造影剤が入っていないことを病院へ伝えさせること。*

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売 : 株式会社バイオデント
 電話番号 : 03-5604-0980
 FAX番号 : 03-3801-7560
 輸入先国名 : アメリカ合衆国
 製造業者 : American Orthodontics
 アメリカンオーソドンティックス